

SWASH GOLD WIPES – SIN PARABENOS

INFORMACIÓN GENERAL

Número de artículo	Bo4028-8
Contenido del paquete	8 toallitas
Contenido de la caja	44 paquetes
Fabricante	Arion Manufacturing B.V. – Países Bajos

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de producto	Dispositivo médico clase I (Directiva 93/42/CEE de Productos Sanitarios)
Composición de la tela	Poliéster & TENCEL
Técnica del tejido	No tejido
Gramaje	110 gr/m ²
Peso de la caja	4.775 gr
Peso de los residuos sólidos de la toallita	35,2 gr
Peso de los residuos sólidos del paquete	5 gr
Valor del pH	5 – 6
Medidas de la toallita	20 cm x 20 cm
Medidas del paquete	10 cm x 26 cm


INGREDIENTES LOCIÓN

FINALIDAD

CONCENTRACIÓN %

Agua	Disolvente en el cual los ingredientes se disuelven.	75-100
Propilenglicol	Retiene el agua y reduce la deshidratación de la piel. Además es un disolvente y determina la viscosidad de la solución.	1-5
Glicerina	Ingrediente atrayente del agua que reduce la deshidratación de la piel. También se usa como solvente en productos cosméticos como el hampú.	1-5
Caprilil glicol	Acondicionador para la piel. También tiene propiedades conservantes.	0,1-1
Polisorbato 20	Emulsionante que hace que las sustancias se mezclen entre sí formando una mezcla homogénea y estable. Además funciona como limpiador suave.	0,1-1
Cocoanfodiacetato disódico	Ingrediente limpiador suave con propiedades para el tratamiento de la piel que hace que la suciedad se mezcle con el agua y se elimine. También ayuda a la formación de espuma.	0,1-1
Tocoferol (Vitamina E)	Conservante e hidratante que previene la deshidratación de la piel.	0,1-1
Caprilato de glicerilo	Componente hidratante. También tiene propiedades conservantes.	0,1-1
Sorbato de potasio	Conservante natural que alarga la vida útil de los productos.	0,1-1
Dipropilenglicol	Disolvente para el sistema de conservación.	0,1-1
Perfume	Una mezcla de varias sustancias aromáticas.	0,1-1
Cloruro de Sodio	Aditivo.	<0,1

INSTRUCCIONES DE USO

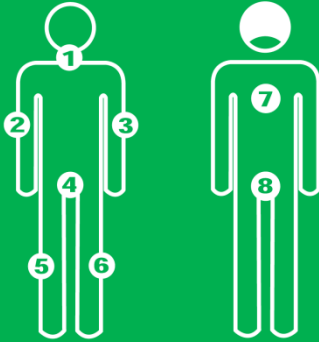

Use una toallita para cada parte del cuerpo como se indica debajo:

1. Cara, cuello y pecho
2. Brazo y axila derechos
3. Brazo y axila izquierdos
4. Genitales
5. Pierna y pie derechos
6. Pierna y pie izquierdos
7. Espalda
8. Nalgas y ano

En caso necesario, caliente el paquete Swash antes de usarlo.

Compruebe la temperatura de las toallitas calentadas antes de usarlas en el paciente.

Las toallitas son desechables y cada paquete debe ser usado con un solo paciente.

Los pliegues de la piel se deben secar cuidadosamente para prevenir lesiones relacionadas con la humedad.

Apto solamente para uso externo.

Se recomienda al personal de enfermería que consuma el paquete 48 horas después de ser abierto.

No tirar por el inodoro.

RESULTADOS DE PRUEBAS

Test de irritación ocular

Los resultados muestran que la loción no causa irritación de la córnea o el iris. Además, la conjuntiva no se inflama ni se pone roja.

Test de irritación cutánea

Los resultados muestran que la loción de las toallitas Swash Gold Wipes no causa irritación alguna en la piel. No hubo indicios de eccema o de rojeces durante o después de las pruebas.